

## ストローマシン5本式 Pentagonal straw filling and sealing machine SFM-5

コード番号 Code No.	01152000	01152100	01152200
型式 Specification	SFM-5 0.5用 100V SFM-5 for 0.5 100V	SFM-5 0.5用 220V SFM-5 for 0.5 220V	SFM-5 0.25用 220V SFM-5 for 0.25 220V
対応ストロー管 Straw size	ストロー精液管0.5mL Straw tube 0.5mL		ストロー精液管0.25mL Straw tube 0.25mL
サイズ(W.D.H.) Size (W.D.H.)	780×500×460mm		
電源 Power source	AC100V～240V (50Hz/60Hz) 使用電圧に変更可能 Can be changed to AC100V～240V (50Hz/60Hz) Voltage.		
消費電力 Power consumption	400W ※	300W ※	
質量 Weight	約60kg 60kg approx.		

### 構成 Accessories

品名 Description	数量 Qty	品名 Description	数量 Qty
本体用電源コード Power cable for main body (color: Black)	1本 1pc	シリコン栓セット Silicone cap for vacuum bottle	1組 1pc
超音波発振器 Ultrasonic oscillator	1台 1unit	真空瓶 Vacuum bottle	1個 1pc
超音波発振器用電源コード Power cable for Ultrasonic oscillator(color; gray)	1本 1pc	フィルタ Filter	1個 1pc
注入針 Injection Needle	5個 5pcs	フラスコ受け台 Flask receiver	1個 1pc
エアースクション針 Suction Needle	1個 1pc	注入パイプ Injection pipe	5組 5pcs
エアースクション針用カラー Collar for Suction Needle	5個 5pcs	ストロー管受け箱 Receiver for straw tube	1組 1pc
シリコンパッキン(注入針、エアースクション針共通) Silicone O ring (for both needles)	80個 80pcs	シリコンオイル (0.5mL) Silicone Oil 0.5mL	1個 1set
注入針用シリコンチューブ(5本入) Silicone tube for Suction Needle	15組 5pcs x 15sets	保守用六角レンチセット Hexagonal Wrench	1組 1set
エアースクション針用シリコンチューブ(5本入) Silicone tube for Suction needle	3組 5pcs x 3sets	試験用ストロー管 Straw tube for test operation	1000本 1000pcs

● 受注生産品です。納期をご確認ください。 ※ 入力電圧によって消費電力量は変わります。  
● Made-to-order. Please ask us for delivery date. ※ Power consumption varies depending on end input voltage.

\*外観・仕様は予告なく変更することがあります。 \*Specifications are subject to change without prior notice.

21-7-FHK

# ストローマシン5本式 SFM-5

## Pentagonal straw filling and sealing machine SFM-5



**FHK**  
富士平工業株式会社

**FHK**


富士平工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷6丁目11番6号  
TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663  
URL/http://www.fujihira.co.jp

北海道富士平工業株式会社

〒001-0027 札幌市北区北27条西9丁目5番22号  
TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406  
帯広支店〒080-0027 帯広市西17条南1丁目15番27号  
TEL(0155)58-1811 FAX(0155)58-1815

希釈精液をストロー精液管に5本同時に充填及び閉封する世界初の機能を搭載している装置です。本体操作にタッチパネルを採用しており、操作性が簡単です。Auto5 Modeでは希釈精液量が少なくなると、自動的に5本充填から1本充填に切り替わり、精液及びストロー管の無駄を極力少なくすることが可能になりました(1本生産開始本数を設定)。5 straws are filled and sealed in one cycle. High work efficiency with front touch panel.

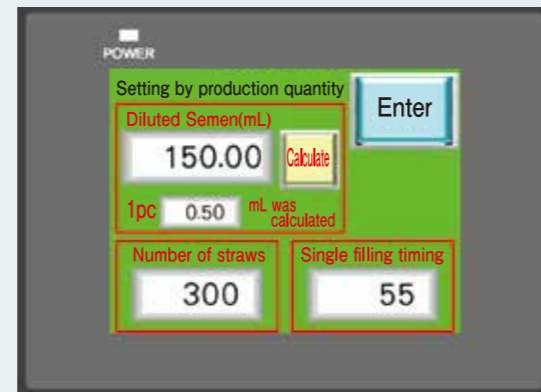

**I** 生産した希釈精液量とストロー管への充填量を入力することにより生産本数が自動的に算出されるため、これまでの生産本数計算の工程を省略することが可能になりました。  
The machine automatically computes the number of semen straws by preliminary input the diluted semen volume and filling volume to one straw.


**V** ストロー管充填時に不具合状況が発生した場合に一時停止させる機能があります。  
Pause and stop function provided in case of trouble during the operation.

**VI** 充填終了後、ホッパー内に余ったストロー管を排出する機能があります。  
This machine has automatic ejection function of straws from the hopper.



**II** Auto5Modeを選択すると一度にストロー管5本へ精液充填可能です。  
Choose Auto5 mode to fill 5 straws at once.

**III** 設定した本数に達すると、自動でストロー管1本への精液充填に切り替わります。また、途中で手動により1本充填へ強制的に変更することも可能です。  
When the remaining volume of semen comes to be small, the machine automatically switches to single straw filling. It is also possible to manually switch to single straw filling.

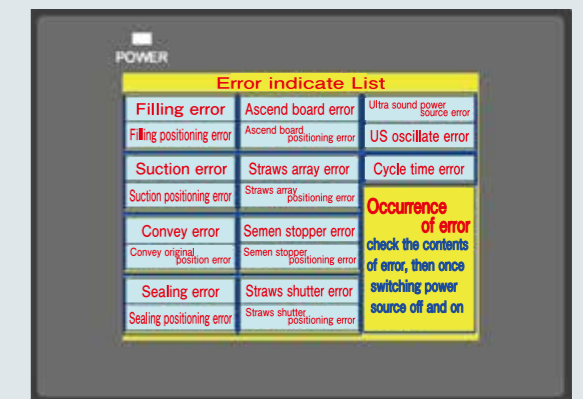

**VII** 本装置に不具合が発生した場合に不具合箇所が表示される機能があります。そのため仮に不具合が発生しても的確に対応することができます。  
In case of trouble, result of self-detection appears on screen to assist appropriate trouble shooting.

**IV** Auto1Modeを選択するとストロー管1本のみ精液充填されます。連続運転(ホッパー内のストロー管がなくなると生産終了)と設定運転(設定したストロー管の本数のみ生産)の2種類の運転が選択可能です。  
Choose Auto1 mode to fill single straw at a time. 2 configurations available; Continuous operation (Machine fills the straws as much as you have in the straw hopper). Setting operation (Machine fills only the designated number of straws from operation panel).

